

# POLVO PROTECTOR PARA OSTOMÍA

(NO ESTÉRIL)

Mantiene la piel seca y reduce la irritación por exudado.







# POLVO PROTECTOR PARA OSTOMÍA (NO ESTÉRIL)

## Polvo Protector para Ostomía:

Se ultiliza sobre la piel peristomal para mantenerla seca, lo que a su vez reduce la irritación de la piel por exudado.

Pacientes con la ostomía como colostomía, yeyunostomía, ileostomía.

# **ESPECIFICACIONES**

REF. No.	Botella	Descripción
SY02028	28 g	
		– No estéril
SY02050	50 g	

## Caratecterísticas:

- Rapidamente absorbe el exceso de humedad de la superficie de la piel para que se mantenga seca.
- Se puede utilizar entre la piel peristomal y la barrera de la piel para formar una película fina y protectiva sobre la superficie de la piel.





SY02028

SY02050

# **CÓMO SE UTILIZA**

Pacientes con la ostomía como colostomía, yeyunostomía, ileostomía.



Limpie y seque la piel

peristomal.



MOVER
Mueva la botella antes
de abrir.



APLICAR
Apunte la boquilla al
sitio previsto y aplique
el polvo agitando la
botella.



BORRAR
Borre el exceso de
polvo suavemente para
formar una película
fina y protectora sobre
la piel.



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., Danshuei Dist., New Taipei City. 251 Taiwan Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266 www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com



